

UNIKE EGENSKAPER

- ingen bruk av fluss-syre
- best fargetilpasning
- kan brukes med LED-lamper
- ingen mikrolekkasje eller fargeendring i skjøten mellom kompositt og porselen

Brukerveiledning

Vi anbefaler bruk av kofferdam. Sandblås overflaten. Alternativt: rufs opp porselens- eller metall-overflaten med et bor.

Etter rengjøring: blås med oljefri luft for å fjerne all fukt. Overflaten bør være helt tørr (viktig for en høy bindestyrke).

Umiddelbart etter rengjøring og tørking påføres et tynt lag av Tender Bond metallprimer på porselens- eller metalloverflaten med en børste. Lufttørk i 1-2 minutter. Imidlertid bør dekket ikke være for vått eller utett. Om nødvendig: blås forsiktig tørr luft fra treveissprøyten.

Dekk eksponert metall med et meget tynt lag Tender Paste Opaque Light og lysherd i 40 sekunder med herdelampen (halogen eller LED).

Deretter: påfør et tynt lag Tender Paste Opaque Clear på porselenet og

lysherd i 40 sekunder med herdelampen (halogen eller LED).

Dette laget er nødvendig for å sikre en optimal binding.

Påfør kompositt i lagteknikk og lysherd.

Avslutt komposittarbeidet og polér.

MERK: overflatene på rammeverket bør renses for alt fett og rester etter polering. Opaque paste bør kun påføres i meget tynne lag. Hvis opaque paste påføres for tykt hindres en optimal herding og bindingen svekkes.

Arbeidstid: 1 minutt (ved mer enn 1 minutt vil bindestyrken reduseres).

Lagring: < 25°. Sett hetten på sprøyten etter bruk og beskytt den mot direkte lys. Benyttes ikke etter utløpsdato.

Bieffekter: Ekstremt sjelden.

Kontraindikasjoner: benyttes ikke i tilfeller med hypersensitivitet overfor en eller flere av disse komponentene.

Bestillingsinformasjon:

FG1300 Tender Repair Kit for metall og porselen
FG1310 Tender Repair Kit for porselen

Tender
repair
System


Reparasjon av porselen
uten bruk av fluss-syre




- Større biokompatibilitet
- Vevsvennlig
- Sterkere binding

TECHNOMEDICS
TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39

Hurtig, sikker og pålitelig reparasjon

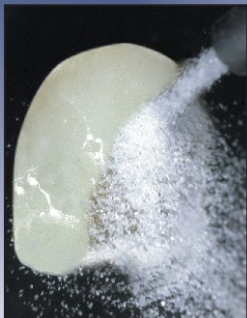

1 Sandblåsing




2 Tender bond på metall og porselen



3

a. Tender paste opaque "O2" opaque på metall




b. Tender paste clear "clear" på porselen




4

Kompositt-dentinmasser

Enamel plus HFO (her påført med silikon-tip)



5

Kompositt-emaljmasser

Enamel plus HFO opalescerende, intensive og GE-masser




6

Polering

Enamel plus SHINY diamantpastaer med geitehårsbørste og aluminiumsoksid med filt-børste



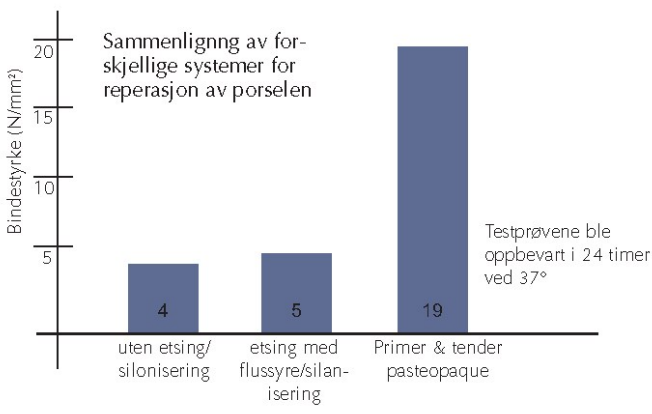

TENDER REPAIR KIT for porselen og metall FG1300

- 1 x 2,5 ml metall- og porselen primer
- 1 x 3 g. pasta opaque clear for porselen
- 1 x 3 g. pasta opaque O2 for metall
- 1 stk Enamel plus "M" børste

TENDER REPAIR KIT for porselen FG1310

- 1 x 2,5 ml metall- og porselen primer
- 1 x 3 g. pasta opaque clear for feste/dekke av porselen
- 1 stk Enamel plus "M" børste