


Hva betyr markeringene på BT-race, BioRace og Race-filene?



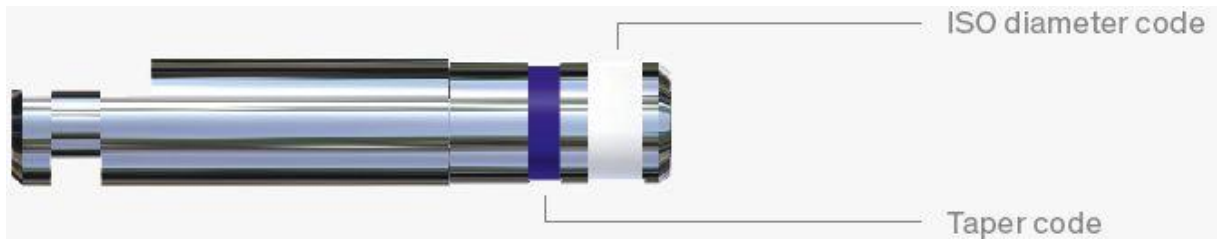


På BT-race- og på de nyeste Race og BioRace-filene er det to fargekodede ringer.

- Den tykkeste viser **størrelsen** på filen (ISO)
- Den tynneste viser instrumentets konisitet (**taper**)



Instrumentet over er altså en 15/.06 (det kan også være en 45/.06) – se oversikten nedenfor:

Ring Ø ISO


														
6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80

Taper

				
.02	.04	.06	.08	.10

BT-race og de nyeste RaCe/BioRace-instrumentene har også lengdemarkeringer:

Depth marks

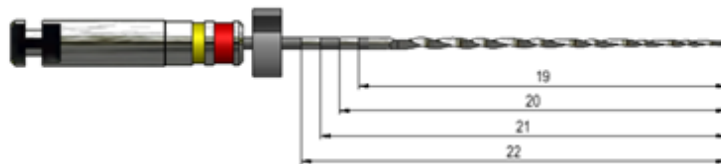

21 mm length file
Marks at 19 and 20 mm

25 and 31 mm files
Marks at 19, 20, 21 and 22 mm

Fargen på silikonstopperne angir lengden på filen:

