

Gutta Cut®

Avkutting av guttaperkaspisser med varme


Hjertelig til lykke med anskaffelsen av Gutta Cut®!

Dette kabelløse apparatet med utskiftbare innsatser er beregnet for hurtig, ren og sikker avkutting av guttaperkaspisser med varme. Med den sløyfeformede spissen oppnås kaviteten godt, og stiftene som stikker ut direkte på kanalvingen er nøyaktig atskilt, slik at man forhindrer låsing av fyllingen blir forhindret. Man kan velge mellom forskjellige instrumentspisser, og kan autoklaveres for ftergangsbruk. Det kabeløse håndenhet kan brukes uten ladestasjon på behandlingssteder for inntil ca. 80 gangers bruk, og er dermed alltid klart til bruk.

Leveringsomfang

- 1 Ladestasjon (kan leveres for 110 eller 220 V) med to plasser for hver en håndenhet.
- 1 Håndenhet (med oppladbart nikkel-medtallhybridbatteri)
- 4 Kuttespisser
- 1 Bruksanvisning

Du kan få flere kuttespisser og en separat håndenhet hos leverandøren din.

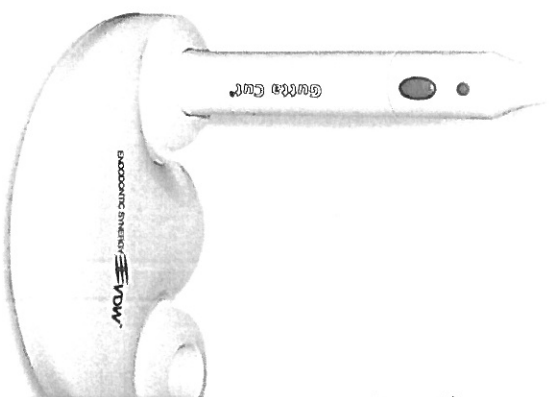

Advarsler

- Ikke berør leppene, tankkjøttet eller slimhinnen i munnen med den varme kuttespissen - fare for skader! Benytt alltid en kofferdam (gummibeskytter)!
- Brannfare: Den oppvarmete spissen må ikke bringes i berøring med brennbare gasser eller væsker.
- Apparatet må ikke rengjøres med brennbare rengjøringsmidler.
- Apparatet er ikke egnet for bruk i omgivelser med brennbare gasser.
- Håndenheten og ladestasjonen må ikke senkes ned i væske.
- Vær oppmerksom på at kuttespisser som blir skiftet ut under behandlingen, fremdeles kan være varme.
- Hvis det kommer en eller annen væske ut av enheten som tyder på at batteriet lekker, må du avbryte arbeidet umiddelbart og sende det til et autorisert serviceverksted for å bytte batteri. Det er farlig å bruke apparatet når batteriet er oppbrukt.
- Det er farlig å åpne apparatet for å bytte batteri. Hvis apparatet åpnes, opphever garantien.

Forholdsregler

- Bøy aldri spissen hvis den befinner seg i håndenheten.
- Levetiden til kuttesspissene påvirkes negativt hvis det brukes for mye kraft ved behandlingen.
- For å sikre optimal levetid for nikkel-medtallhybrid-batteriet, må det aldri lades opp lenger enn 12 timer uten avbrudd.

Bivirkninger

Det finnes ingen kjente bivirkninger.

Brukerveiledning

Forberedelse

1. Før igangsettning må man passe på at nettspenningen passer med den som er angitt på apparatet.

Lading

1. Apparatet må først lades helt opp ved at ladestasjonen forbindes med en nettslittkontakt.
2. Sett håndenheten i en av de to plassene i ladestasjonen. Dioden på håndenheten lyser under ladingen.

Henvisninger for bruk med nikkel-medtallhybridbatteri

- Før du bruker apparatet første gang, må det være fullstendig oppladet. Denne prosessen varer 12 timer.
- Nikkel-medtallhybridbatteriet som befinner seg i Gutta Cut® skal alltid være fullstendig utladet før det lades helt opp igjen. På denne måten sikrer du optimal levetid for Gutta Cut®. Levetiden er ca. 2 år, avhengig av brukshyppigheten.
- Ikke lad batteriet lenger enn nødvendig for å nå fullading. Det må under ingen omstendighet lades opp uavbrutt lenger enn 12 timer.

Bruk

1. Sett en kuttesspiss på håndenheten. Pass på at vinkelen på spissen peker i motsatt retning av betjeningsknappen. Dette letter arbeidet.
- Dersom det er nødvendig, kan kuttesspissens forinnstillede vinkel på 30° endres en smule. Dette bør gjøres med stor forsiktighet.

Forsiktig: Bøy aldri spissen hvis den befinner seg i håndenheten.

2. Før kuttesspissen i kald tilstand (uten å trykke på betjeningsknappen) inn i kaviteten. Gutta-perkastiftene som skal kuttes, må være omsluttet av sløyfen på kuttesspissen.

3. Så snart kuttespissen befinner seg i kanalinngangen, kan du trykke på betjeningsknappen.

4. Spissen varmes opp på sekunder, og gutta-perkastiftene kan kuttes raskt og rent.

5. Etter avkuttingen må du slippe betjeningsknappen. Kuttespissen kjøler seg av med en gang, og kan bli fjernet fra pasientens munn.

Betjeningsknappen er en „kontaktknapp“ som bare kobler til apparatet når den er trykket inn. Når den slippes kobler apparatet seg av.

6. Ta kuttespissen av håndenheten etter bruk.

Rengjøring og sterilisering

- Kuttespissene må før hver bruk på pasienter rengjøres og steriliseres (også før første gangs bruk - kuttespissene blir ikke levert sterile).
- Eventuelle gutta-perkastifter som måtte bli igjen på instrumentspissen kan fjernes forsiktig ved å stryke over den med en bomullstupfer.
- Kuttespissene kan ved bruk for formålet autoklaveres maksimalt 25 ganger. Steriliseringstiden retter seg etter steriliserings-temperaturen (ved 121°C min. 20 min og ved 132 °C/134 °C min. 5 min hhv. 18 min ved inaktivtivering av prionen).
- Tørk av håndenheten og ladestasjonen med et mildt, klorfritt desinfeksjonsmiddel. Desinfeksjonsmidlet bør være godkjent av DHGM eller FDA eller bære et CE-merke. Du bør dessuten ikke bruke en fenolholdig desinfeksjonsløsning, korrosjonsbeskyttelsesmiddel eller sterk syre, eller sterke alkaliske løsninger. Når du bruker desinfeksjonsløsninger må du ta hensyn til produsentens anvisninger.

Vedlikehold

Gutta Cur® trenger ikke noe vedlikehold og er enkel å bruke.

Feilretting

Dersom det ikke kommer til noen umiddelbar oppvarming av kuttespissen ved bruk av betjeningsknappen, må du undersøke om det er elektrisk kontakt til kuttespissen. Er denne defekt, må du skifte den ut med en ny kuttespiss.

Hvis dioden på håndenheten ikke lyser under lading, må du undersøke om ladestasjonen er knyttet til strømmettet, eventuelt må strømmettet selv kontrolleres.



Dette medisinerproduktet ble sendt ut på markedet etter 13.08.2005. Produktet må ikke deponeres i vanlig husholdningsavfall. Forskrifter for avfallsbehandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr må overholdes.

Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til disposisjon:



Produsent: VDW GmbH
 Bayerwaldstraße 15 • 81737 München • Germany
 Phone +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
 www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com