

## Hvordan bruke LABRIDA BioClean™.



**1. Bløtlegg børsten** i sterilt saltvann i minst 2 minutter.



**2. Fest børsten i et** oscillerende vinkelstykke.  
**Ikke ta på fibrene!**



**3. Før børsten ned i lommen** rundt implantatet. Rotér langsomt, **600 – 1500 rpm!**  
Spyl implantatet med sterilt saltvann..

## **PRODUKTBESKRIVELSE:**

**LABRIDA BioClean™** er et dentalt instrument med en arbeidsdel av raskt resorberende kitosan og et skaft av rustfritt stål, belagt med polypropylen. Arbeidsdelen med blåfargede fibre er 8 – 9 mm lang.

## **INDIKASJONER:**

**LABRIDA BioClean™** brukes til ikke-kirurgisk, mekanisk rengjøring av eksponerte tannimplantatoverflater, primært ved peri-implantat mucositis.

## **BRUKSANVISNING:**

1. Ta ut instrumentet i plastholderen, med en pinsett.
2. Fukt børsten i 2 - 5 minutter i sterilt saltvann. Kitosanfibrene sveller, og blir myke og fleksible, samt at de oppnår optimal holdbarhet.
3. Sett instrumentet i vinkelstykket, kontrollér at det sitter fast. Et oscillerende vinkelstykke må brukes.
4. Før børsten ned i lommen rundt implantatet før du starter vinkelstykket. Rotér med en hastighet på 600-1500 rpm (max 2000 rpm) uten bruk av trykk eller kraft. Hold kontakten med implantatet under hele behandlingen. Bruk ca. 2-3 minutter pr. implantat.
5. Spyl implantatet med sterilt saltvann etter behandlingen.

**LABRIDA BioClean™** er pakket sterilt og for engangsbruk. Instrumentet skal IKKE resteriliseres. Oppbevares mørkt ved romtemperatur.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt på [post@labrida.no](mailto:post@labrida.no).

