

HVORDAN BRUKE SUPER-BOND C&B



Bruksanvisningen bør leses
nøye før du gjør noe annet!




Se den engelske bruksanvisningen for nærmere instruksjoner.

Bruk ikke cavity varnish, andre bondinger, andre etching midler eller materialer med eugenol sammen med Super-Bond C&B.
Porselensskålen bør oppbevares i kjøleskap.

1. Avkjøl mixe-skålen

For å unngå for tidlig herding. (Oppbevar gjerne mixe-skålen i kjøleskapet når den ikke er i bruk. Skålen blåses tørr hvis kondens dannes.)

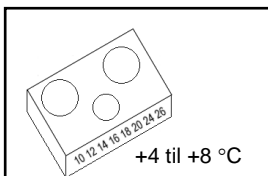

2. Rens overflaten.

TANNEN pusses med pimpstein e.l. Skyll og tørk.

METALLOVERFLATER sandblåses eller behandles på lignende måte.


EDELMETALLER skal også varmebehandles i ovn eller behandles med V-Primer.

PORSELENSOVERFLATER skal flussyrebehandles og silaniseres, eller behandles med Porcelain Liner M.

3. Emalje-behandling

Applisér Surface agent (rød) på emalje overflater. (La det ikke komme i kontakt med dentinet.) La det ligge i 30 - 60 sekunder.

Skyll grundig og tørk.

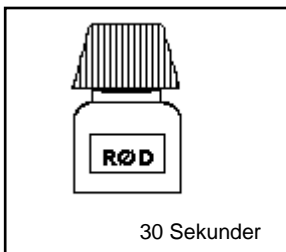

4. Dentin-behandling

Applisér Surface agent (grønn) på dentin-overflater (ingen skade skjedd hvis det kommer i kontakt med emaljen) La det ligge i 5-10 sekunder.


Skyll dentin og emalje grundig og tørk.



5 - 10 sekunder

5. Bland monomer og catalyst.

Bland forsiktig 4 dråpe monomer (Gul kork) og 1 dråpe catalyst.

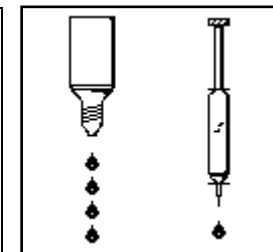

6. Bland polymer og aktivisert væske.

Tilsett 1 liten skje L-polymer av ønsket farge i samme skålen. Rør om til du oppnår en kremet konsistens. Det er mulig å forlenge arbeidstiden ved å tilsette mindre polymer.

Mengde polymer	1,2 skje	1 skje	0,75 skje
Arb.tid	110 sek	150 sek	230 sek
Herde tid	6 min	8,5 min	15,5 min



7. Sementering

Applisér så blandingen på alle overflater som skal sementeres. Restaurasjonen plasseres og overskytende sement fjernes straks. Restaurasjonen holdes helt stille i 10 minutter.



10 minutter

Det kan med fordel plasseres kompositt direkte på et tynt lag Super-Bond C&B. Det er da viktig å la sementen herde (8-10 min.) før kompositten appliseres.